



## Beboer-brik (Demenssikring)

### ANVENDELSE

Beboer-brikken kan anvendes som både demenssikring og demenslås.

#### Demenssikring:

Beboer-brikken benyttes som alarmgiver til vores demenssikring, og alarmerer personalet, hvis en beboer vandrer forbi en udgang med demenssensorer. Alarmer modtages via IntelligentCARE app, og ved alarm vises hvilken zone borgeren befinder sig i. Demenssensorerne har en rækkevidde på 2-10 meter.

#### Demenslås:

Beboer-brikken kan også anvendes til automatisk oplåsning af beboerens egen lejlighed. Låsen sikrer samtidig at den enkelte borger kun har adgang til sin egen bolig, og dermed ikke kan bevæge sig ind til andre borgere.

### SPECIFIKATIONER BEBOER-BRIK

Varenr. Beboer-brik	ICM15107
Varenr. Demenssikr. inkl. gateway	ICM15029
Varenr. Demenssikr. ekskl. gateway	ICM15024
Netværk	Bluetooth
Batteritype	CR 2032 Lithium x 1
Batterilevetid	4 mdr. ved døgndrift
Driftstemperatur	0° - 40° C
IP-klassifisering	IP54
Dimensioner chip	Ø35 x 9 mm

### PLACERING


Beboer-brikken placeres uden på tøj, enten i nakken eller foran på kraven. Fastgørelse klares med den indbyggede magnet, som holder brikken på plads. Fordelen ved den synlige placering er, at personale således ikke er i tvivl, om en beboer er sikret i forhold til eks. vandring. Brikken kan også placeres på gangstativ, kørestol o.lign. Sensorerne indstilles til at opfange signaler fra beboer-brikken i intervallet 1-2 meters højde. Optimal sendestyrke opnås ved at placere beboer-brikken chip/batteridel udaf og magnetdelen ind mod kroppen.

### NETVÆRK

Beboer-brikken kommunikerer trådløst med IntelligentCARE gateway/netværk.

### MONTERING

Det er muligt at foretage individuelle indstillinger for den enkelte borger, via et diskret panel der hænges på væggen, der hvor demenszonen skal oprettes. Panelet tilsluttes strøm og montør kræves.

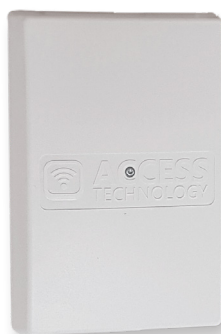

Gateway



Panel