



## Nødkaldssatellit

### Fastmonteret

#### ANVENDELSE

Optimerer tovejskommunikation mellem borger og plejepersonale, i forbindelse med et nødkald. Anvendes på institutioner og plejehjem, hvor beboerens lejlighed er så stor, at samtalen ikke kan føres fra rum til rum.

Nødkaldssatelliten anvendes sammen med en nødkaldsbase, som sikrer tovejskommunikationen mellem borger og plejepersonale. Nødkaldsbasen placeres eksempelvis i stuen og nødkaldssatelliten på badeværelset eller soveværelset. På den måde er der mulighed for tovejskommunikation fra to steder i lejligheden ifm. et nødkald.

#### SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM16018
Frekvens	1880-1900 MHz
Højttaler	1,5 W
Rækkevidde	150 m (åbent areal)
Strøm	9V 500mA adapter
Batteritype	LR14/C 1,5V, 9A x 4
Batteri back-up levetid	6 dage
Driftstemperatur	-10° til + 45° C
IP klassificering	IP42
Dimensioner	141 x 93 x 29 mm

#### ALARM

Nødkald aktiveres på nødkaldssatelliten, ved tryk på den røde knap. Nødkaldet kan også ske ved at trykke på den store røde knap på nødkaldsbasen.

Tovejskommunikationen sker fra den enhed, hvorfra nødkaldet er aktiveret.

Når tovejskommunikationen ønskes afsluttet, trykkes på den grønne RESET knap. Ønsker man at annullere en alarm, holdes RESET knappen nede i 5 sekunder.

#### FUNKTIONER OG FORDELE

- God lyd kvalitet.
- Kan anvendes af flere personer samtidigt.
- Indbygget mikrofon og højttaler.
- Fire forskellige niveauer af mikrofon sensitivitet.
- Lavt batteri alarm.



Nødkaldssatelliten anvendes sammen med en nødkaldsbase, for at sikre tovejskommunikationen.