



PRODUKTARK (Ver. 1.0)

## Bevægelsessensor (DEV-ZIG-PIR)

### ANVENDELSE

Bevægelsessensoren anvendes hos borgere, hvor der er risiko for fald, som erstatning for trædemåtte, eller når der ønskes alarm til personalet, hvis borgeren f.eks. går på badeværelset eller i køkkenet i bestemte tidsrum.

### ALARMERING

- Hvis der er manglende aktivitet fra borger.
- Hvis borger forlader sengen (vituel trædemåtte).
- Hvis borger går på badeværelset ol.
- Alarmer modtages via IntelligentCARE app. Ved alarm vises hvor sensoren er placeret.
- Det er muligt at lave individuelle alarmindstillinger for den enkelte borger/sensor.
- Alarm ved lavt batteri.

### PLACERING OG MONTERING

Sensoren placeres i stue, køkken, badeværelse o.l. i en sensorfod, så den er nem at flytte rundt på. Halvdelen af sensorøjet er dækket, og registrerer bevægelse fra det område af sensorøjet der ikke er dækket - i en vinkel på 180° til siderne og ca. 5 meter frem. Sensorretningen er ligeud + opad eller ligeud + nedad, afhængigt af hvordan sensoren vendes. Skal sensoren erstatte en trædemåtte, stilles den på gulvet, så sensorretningen peger ligeud + nedad. Ellers placeres sensorfoden i den højde man ønsker, eksempelvis under sengen eller på en kommode.

Sensoren kan også monteres på en væg med dobbeltklæbende tape, helst i et hjørne for bedst udsyn.

**OBS:** Sensorfod købes som ekstra tilbehør.


### NETVÆRK

Bevægelsessensoren kommunikerer trådløst med IntelligentCARE gateway/netværk.

### SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM19005
Netværk	Zigbee, trådløse kommunikation
Batteritype	AAA lithium x 2
Batterilevetid	2 år
Driftstemperatur	0° til +50° C
IP-klassifisering	IP52
Dimensioner	97 x 57 x 35 mm

### SENSOR DÆKNINGSOMRÅDE

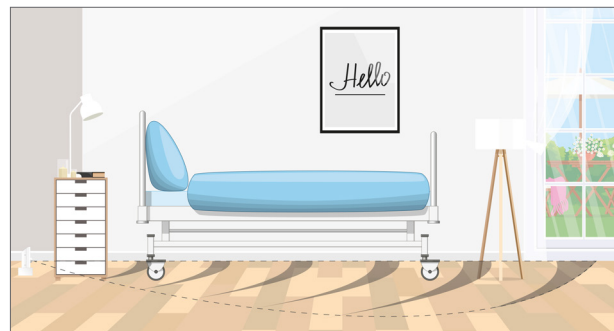

### ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSADFDELING SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com