



PRODUKTARK (Ver. 1.0)

## Sengesensor til institutioner (AT-ZIG-BED-STD)

### ANVENDELSE

Forebyggelse af fald fra seng og alarmering ved forladt seng. Anvendes hos borgere, som er i risiko for at falde ud af sengen, eller hvor der ønskes alarm, hvis borgeren forlader sengen.

### ALARMERING


- Hvis borger sætter sig op i seng eller forlader seng.
- Alarm aktiveres via IntelligentCARE app, hvor der er mulighed for at foretage individuelle alarmindstillinger for den enkelte borger, eksempelvis at alarmen skal være aktiveret i et bestemt tidsinterval.
- Alarm ved lavt batteri.

### MONTERING

Sensoren monteres på væggen på medfølgende vægbeslag, eller på et sengebeslag som kan tilkøbes. Sensoren monteres minimum 60 cm over hovedgærdet i soveposition. Sengebeslaget kan justes op og ned i højden i forhold til sengegavlen.

### NETVÆRK

Sengesensoren kommunikerer trådløst med Intelligent-CARE gateway/netværk.

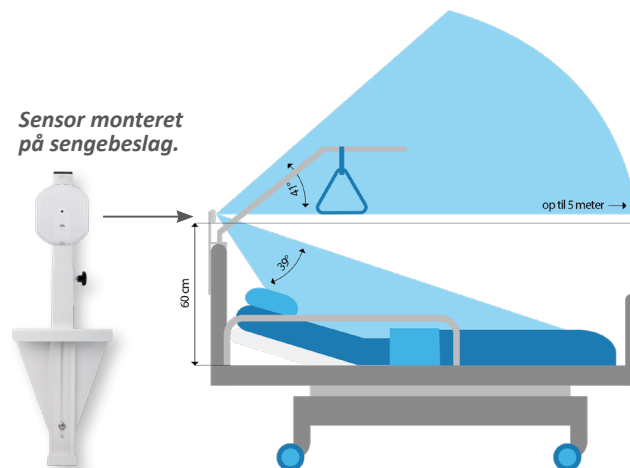

### SPECIFIKATIONER

Varenummer	ICM19007
Netværk	Zigbee, trådløse kommunikationsstandard
Batteritype	2 x AA standard batteri
Driftstemperatur	0° til +45° C
IP-klassifisering	IP40
Dimensioner	91 x 107 x 33 mm

### ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSADFDELING SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com